


Pomůcka na měření PD = vzdálenost zornic

(PD = Pupillary distance = vzdálenost zornic)

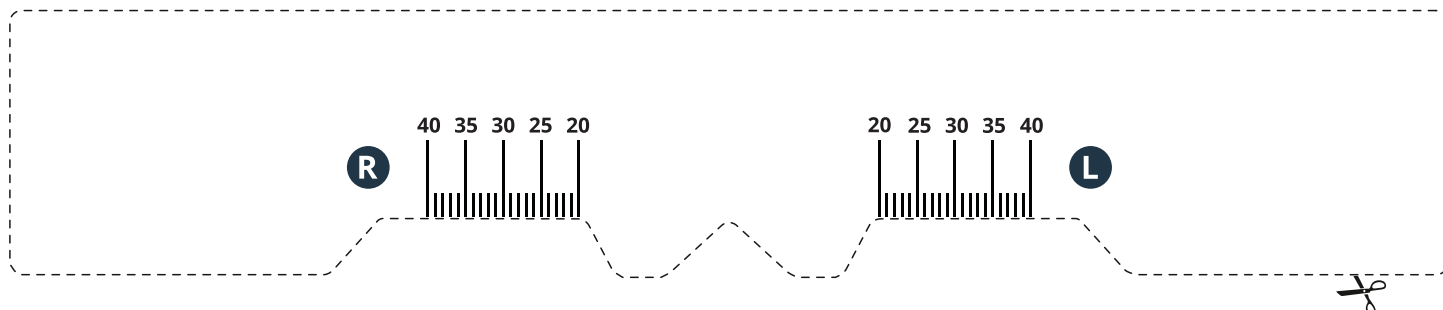

Jak si změřit PD – pupilární distanci?

1. Vytiskněte si celou stránku v reálné velikost.
2. Pomůcku na měření porovnejte s opravdovým pravítkem (1 cm musí být 1 cm!).
3. Pomůcku na měření si vystříhnete.
4. Měření PD proveďte následovně:
 - Pomůcku na měření přiložte na kořen nosu stejně, jako byste si nasazovali brýle.
 - Pokud budete měření provádět sám/sama, postavte se před zrcadlo. Zadívejte se před sebe a na každém oku si na papírové stupnici označte, v jaké vzdálenosti od kořene nosu se nachází vaše zornička.
 - Měření jde snadněji, když vám někdo pomůže – vy si přidržíte pomůcku na měření a druhá osoba označí vzdálenosti zorniček pro pravé oko (R) a pro levé oko (L).
 - Naměřenou hodnotu pro PD pak vybere v objednávkovém formuláři společně s dioptriemi na cocky-online.cz

